

# Compeed, plastry na halluksy, hydrokoloidowe, 5 sztuk



Cena: 29,50 zł

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Opis produktu:

Plastry na zwyrodnienia kostne COMPEED®, zaprojektowane specjalnie, aby dobrze przylegały do stopy, zapewniają natychmiastową ulgę od bolesnego ucisku i obcierania. Pomagają zapobiegać powstawaniu pęcherzy i dalszemu ztwardnieniu skóry, aby uniknąć wystąpienia innych bolesnych dolegliwości skórnych.

### Technologia hydrokoloidowa

Aktywny żel na bazie technologii hydrokoloidowej COMPEED® zapewnia błyskawiczną ulgę w bólu dzięki grubo wyścielanej warstwie, która szybko znosi nacisk i eliminuje tarcie, przyczyniające się do dalszego rozwoju palucha koślawego.

ZAPEWNIĄ BŁYSKAWICZNĄ ULGĘ W BÓLU I ZNOSI NACISK.  
AMORTYZUJE PALUCH KOŚLAWY, CHRONIĄC PRZED DALSZYM OBCIERANIEM.  
ZAPOBIEGA INNYM BOLESNYM DOLEGLIWOŚCIOM STÓP POWODOWANYM PRZEZ STWARDNIAŁĄ SKÓRĘ.

### Sposób użycia

Oczyść i osusz skórę przed użyciem. Obszar, na którym znajduje się pęcherz, nie może być tłusty od kremów czy olejków. Usuń warstwę papierową plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej. Przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał pęcherz. Wygładź brzegi plastra. Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni).

Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij po skórze.

**Producent:**

HRA Pharma