

## Compeed, plastry na odciski między palcami, 10 sztuk



Cena: 23,92 zł

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 szt.
Postać	-
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Opis produktu:

COMPEED® Plastry na odciski zawierają aktywny żel hydrokoloidowy, który przynosi natychmiastową ulgę w bólu i pomaga usunąć odcisk. Nie tylko pozostaje na miejscu przez kilka dni\*, ale również zapewnia optymalną amortyzację, chroniąc przed ocieraniem m.in. pod stopą i uciskiem. \* W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić.

#### Technologia hydrokoloidowa

Technologia hydrokoloidowa COMPEED® zapewnia błyskawiczną ulgę w bólu dzięki grubej wyściełanej warstwie, która szybko znosi nacisk powodujący powstanie odcisku. Uznana technologia gojenia ran działa od wewnątrz, poprawiając nawilżenie i tym samym zmiękcza odcisk, co z kolei ułatwia jego usunięcie. Pozostaje na miejscu przez kilka dni, pomagając zapobiec dalszemu, bolesnemu ocieraniu. W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić.

NATYCHMIASTOWA ULGA W BÓLU  
AMORTYZUJE I CHRONI PRZED OBCIERANIEM I NACISKIEM  
POMAGA ZMIĘKCZYĆ I USUNĄĆ MIĘKKIE I TWARDE ODCISKI  
POZOSTAJE NA MIEJSCU PRZEZ KILKA DNI

#### Właściwości plastra

Głęboka amortyzacja znosząca nacisk powodujący odcisk i łagodząca ból.  
Ultraprzylepne, wymodelowane krawędzie, dzięki którym warstwa amortyzacji elastycznie dopasowuje się do ruchów i pozostaje na miejscu, chroniąc przed dalszym tarciem.

Dzięki swojej konstrukcji dobrze dopasowany, wodoodporny i oddychający plaster utrzymuje naturalną wilgoć i nie dopuszcza bakterii z zewnątrz, przyspieszając naturalny proces gojenia.

## Sposób użycia

Oczyść i osusz skórę przed użyciem. Docelowy obszar nie może być tłusty od kremów czy olejków. Usuń górną, a następnie dolną papierową warstwę plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej. Przyklej plaster tak, aby osadzony w nim dysk znajdował się centralnie na odcisku. Wygładź brzegi plastra. Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu do kilku dni. Dla najlepszych rezultatów stosuj COMPEED® do czasu, aż skóra całkowicie się zagoi.

## Producent:

HRA Pharma