

Compeed, plastry na opryszczkę, hydrokoloidowe, dyskretne, 15 sztuk

Cena: 40,11 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	15 szt.
Postać	-
Producent	LABORATOIRE HRA PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu:

Dyskretny plaster na opryszczkę COMPEED® zawiera aktywny żel hydrokoloidowy wspomagający szybsze gojenie i zapobieganie powstawaniu strupów. Działa od najwcześniejszego objawu i na wszystkich kolejnych etapach, aby pomóc powstrzymać nasilanie się objawów opryszczki.

Dyskretny plaster nie tylko chroni wykwit opryszczki, ale także pomaga uniknąć zakłopotania w interakcjach społecznych. Plaster tworzy także tarczę przeciwwirusową, zmniejszając ryzyko zakażenia.

JAK NAŁOŻYĆ PLASTER

Umyć ręce przed i po użyciu. Upewnić się, że skóra jest czysta i sucha. Nie nakładać kremu na wargę, ponieważ może to uniemożliwić przyklejenie plastru. Oderwać jeden plaster wzdłuż perforowanej krawędzi i oddzielić go od pozostałych.

Przytrzymać przezroczysty papierowy aplikator za zakrzywioną krawędź.

Używając obu dłoni, oderwać przezroczysty papierowy aplikator od zielono-niebieskiej osłony zabezpieczającej.

W górnej części aplikatora widoczny będzie okrągły plaster na opryszczkę. Uważać, aby nie dotykać klejącej strony plastru.

Nałożyć tę część aplikatora na opryszczkę, korzystając jednocześnie z lusterka i delikatnie przycisnąć, aby mocno umieścić plaster na opryszczce.

Delikatnie oderwać spodnią stronę aplikatora, pozostawiając plaster na miejscu. Na plaster można nałożyć makijaż lub szminkę.

SZYBKIE GOJENIE

TARCZA PRZECIWWIRUSOWA ZMNIEJSZA RYZYKO ZAKAŻENIA

ZAPOBIEGA POWSTAWANIU STRUPÓW

OGRANICZA OBJAWY OD PIERWSZEJ OZNAKI
DYSKRETNA OCHRONA

Właściwości plastra

Ultracienka warstwa żelu hydrokoloid 075 pochłania nadmiar płynu, przyczyniając się do szybkiego gojenia, oraz zapewnia optymalne, wilgotne środowisko, zapobiegające tworzeniu się strupów.

Membrana półprzepuszczalna pozwala ranie oddychać, jednocześnie chroniąc ją przed zewnętrznymi czynnikami zanieczyszczającymi, takimi jak brud i bakterie.

Bariera ochronna, zabezpieczająca przed czynnikami zewnętrznymi, ogranicza ryzyko zakażenia i nasilanie się objawów.

Ultraprzylepne, wymodelowane krawędzie sprawiają, że plaster Compeed elastycznie dopasowuje się do ruchów i pozostaje na miejscu do 12 godzin.

Przezroczysty plaster nie odznacza się na skórze i zapewnia maksymalną dyskrecję.

Sposób użycia

Plaster na opryszczkę można stosować na każdym etapie rozwoju wykwitu. Najlepiej jest przykleić plaster po wystąpieniu pierwszego objawu wskazującego na zbliżający się wykwit opryszczki – zwykle jest to uczucie mrowienia lub swędzenie.

Producent:

HRA Pharma