

Hexatiab® Softgel kapsułki dopochwowe 10 sztuk



Cena: 38,79 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 kaps.
Postać	kaps.dopoch.
Producent	HEXANOVA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu:

Hexatiab® Softgel kapsułki dopochwowe to wyrób medyczny o działaniu wspomagającym:

- w leczeniu zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych (np. kłykciny)
- w leczeniu zmian poporodowych
- w zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej typu 2 (HSV-2).

Wskazania:

Wyrób medyczny wspomagający leczenie zakażeń bakteryjnych i wirusowych, takich jak zapalenie sromu i pochwy, opryszczka narządów płciowych i brodawki oraz zmiany poporodowe. Tworzy barierę ochronną wokół zmiany, izolując i chroniąc tkanki przed zewnętrznymi czynnikami drażniącymi i ułatwiając prawidłowy fizjologiczny proces tworzenia blizny i gojenia.

Posiada podwójny mechanizm działania:

- izoluje miejsce zastosowania przed atakiem zewnętrznych drobnoustrojów ogranicza kolonizację drobnoustrojów w miejscu aplikacji, tworząc idealne warunki
- do przywrócenia naturalnych warunków fizjologicznych w tkankach.

Skład:

TIAB (kompleks z cząsteczkami aktywnego srebra), hialuronian sodu, wyciąg z Aloe arbadensis, trigliceryd kaprylowo-kaprynowy, stearynian PEG-6 (i) stearynian glikolu (i) stearynian PEG-32, stearynian glicerylu.

Sposób użycia:

1. Dokładnie umyć okolice zewnętrznych narządów płciowych przed użyciem kapsułki.
 2. Wprowadzić miękką kapsułkę głęboko do pochwy.
 3. Powtarzać aplikację raz na dobę przez co najmniej siedem kolejnych dni.
- Wyrób medyczny należy stosować po wystąpieniu pierwszych objawów (świądu, pieczenia, dyskomfortu, itp.). Nie ma konieczności stosowania odstępu czasu po leczeniu miejscowym. Wyrób nie ma działania plemnikobójczego ani antykoncepcyjnego.

Ostrzeżenia:

Nie stosować produktu w innych wskazaniach niż podane w ulotce informacyjnej.
Należy dokładnie umyć ręce przed aplikacją.
Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.
Nie zamrażać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Do stosowania miejscowego – nie połykać.
Nie stosować, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
Nie stosować w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek za składników.
Przerwać leczenie w razie wystąpienia nieprawidłowej reakcji skórnej.
W przypadku długotrwałego stosowania skonsultować się z lekarzem.
W trakcie ciąży i karmienia piersią, stosować wyrób jedynie na zalecenie i pod bezpośrednią kontrolą lekarza.
Używać wyrób na nieuszkodzony nabłonek.
Wyrób nie jest produktem plemnikobójczym ani antykoncepcyjnym.

Przeciwwskazania:

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania.
Potwierdzona nadwrażliwość na składniki wyrobu.
Nie stwierdzono interakcji z lekami ani substancjami leczniczymi.

Warunki przechowywania:

Przechowywać z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
Produkt wystawiony na działanie światła słonecznego może przybrać lekko żółty kolor, ale nie wpływa to na jego działanie ani trwałość.

Zawartość opakowania:

2 blistry zawierające 10 kapsułek dopochwowych

Producent:

NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3, 20124 Mediolan, Włochy

Dystrybutor:

HEXANOVA Sp. z o.o., ul. Brukowa 36, 05-092 Łomianki