

Hyal-Drop Multi, nawilżające krople do oczu, 10ml



Cena: 35,54 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 ml
Postać	krop.do oczu
Producent	DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu:

Właściwości i działanie:

Hyal-Drop multi zapewniają natychmiastowe ukojenie i nawilżenie oczu. Przynoszą szybką ulgę zmęczonym, podrażnionym i łzawiącym oczom. Jest to idealny produkt dla osób cierpiących z powodu łagodnych i umiarkowanych objawów suchego oka, takich jak: zmęczenie, podrażnienie, pieczenie i/lub łzawienie.

Nawilżające krople do oczu Hyal-Drop multi zawierają 0,24% kwasu hialuronowego (w postaci hialuronianu sodu). Dzięki temu w naturalny sposób odświeżają i łagodzą suche oczy. Kwas hialuronowy zawarty w kroplach Hyal-Drop multi ma wpływ na odbudowę warstwy filtru łzowego, zwiększa jego stabilność i zapewnia odpowiednie nawilżenie powierzchni oka^{1,2,3}. Charakteryzują się bardzo dobrą tolerancją, ze względu na brak substancji konserwujących w składzie. Dzięki specjalnej konstrukcji pompki, krople Hyal-Drop multi można stosować aż przez 6 miesięcy po otwarciu.

Hyal-Drop multi to wyrób medyczny, służący nie tylko do nawilżania oczu, ale również do nawilżania i zwilżania miękkich i twardych soczewek kontaktowych podczas noszenia. Poprawiają komfort stosowania soczewek przez cały dzień.

1) Mc Donald CC et al., A randomized, crossover, multicenter study to compare the performance of 0,1% (w/v) sodium hyaluronate with 1,4% (w/v) polyvinyl alcohol in the alleviation of symptoms associated with dry eye syndrome. Eye 2002; 16: 601-607

2) Jing Zhong et al. Hyaluronate acid-dependent protection and enhanced corneal woundhealing against oxidative damage in corneal epithelial cells. Journal of Ophtalmology. Vol. 2016, Article ID 6538051, 10 pages

3) Hamano T. et al. Sodium hyaluronate eyedrops enhance tear film stability. Japanese journal of Ophtalmology 1996; 40 (1): 62-65, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8739501>, data odczytu 16.01.2017

Stosowanie – jak często i jak długo należy stosować krople do oczu Hyal-Drop multi?

Ze względu na brak konserwantów w składzie, nawilżające krople do oczu Hyal-Drop multi można stosować codziennie i tak często jak

zajdzie potrzeba. Nie ma ograniczeń dotyczących czasu stosowania.
W razie potrzeby wpuścić 1 kroplę do oka.

Sposób użycia:

1. Przed użyciem produktu umyj dokładnie ręce.
 2. Zdejmij nakładkę ochronną z końcówki butelki.
 3. Umieść kciuk na ergonomicznym wspierciu dla kciuka i obejmij dolną część butelki palcami. Dwa palce umieść pod spodem butelki.
 4. Odchyl nieznacznie głowę do tyłu. Odwróć butelkę końcówką do dołu i przytrzymaj pionowo nad okiem. Palcem wolnej ręki delikatnie odciągnij dolną powiekę. Naciśnij pompkę, aby uwolnić jedną kroplę do oka. Po zakropieniu, dla jak najlepszego rozprowadzenia kropli na powierzchni oka, zamknij powiekę i powoli poruszaj gałką oczną.
 5. Natychmiast po użyciu strząśnij pozostałości kropli i nałóż nakładkę ochronną na końcówkę butelki.
- Ważne! Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym nieużywaniu produktu: skieruj butelkę w dół i naciśnij pompkę do momentu pojawienia się pierwszej kropli.

Skład:

0,24% hialuronian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny i woda do wstrzykiwań.

Kiedy nie stosować kropli do oczu Hyal-Drop multi:

Kropli do oczu Hyal-Drop multi nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu. Wybrane ważne informacje dotyczące stosowania produktu Hyal-Drop multi: Bardzo rzadko zgłaszano miejscowe reakcje nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać stosowanie wyrobu medycznego. Jeśli pacjent odczuwa trwały dyskomfort lub podrażnienie, powinien przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem. Informacje dotyczące bezpieczeństwa dla pacjentów z ciężkim uszkodzeniem rogówki: W trakcie stosowania produktów do oczu zawierających fosforany, odnotowano w bardzo rzadkich przypadkach odkładanie się fosforanów wapnia w rogówce.

Ważne wskazówki:

- Po otwarciu produkt może być używany przed 6 miesięcy.
- Przed użyciem innego produktu do oczu, należy poczekać co najmniej 15 minut.
- Po otwarciu butelki, krople powinny być używane tylko przez jedną osobę.
- Aby zapobiec urazowi oka lub zanieczyszczeniu roztworu, nie należy dotykać powierzchni oka końcówką butelki.
- Nie stosować po upływie terminu ważności, ani w przypadku uszkodzenia opakowania lub butelki.
- Krople Hyal-Drop multi należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywanie:

Krople Hyal-Drop multi należy przechowywać w temperaturze +1 do +25oC.

Wytwórca:

Bausch & Lomb GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
DE-13581 Berlin

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.