

Intimel, nawilżający żel intymny, 30g

Cena: 12,18 zł



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 g
Postać	-
Producent	ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu:

INTIMEL® nawilżający żel intymny:

- Klarowny, łagodny żel o lekko kwaśnym odczynie pH, mający zastosowanie w niedoborach wydzielania śluzu w pochwie.
- Ułatwia stosunki płciowe w przypadku suchości pochwy (także z użyciem prezerwatywy), a także aplikację tamponów higienicznych, czopków czy użycie termometru.
- Ułatwia przeprowadzanie badań ginekologicznych i ultrasonograficznych.
- Przeznaczony dla kobiet w każdym wieku.

INTIMEL® jest dobrze tolerowany przez skórę i błony śluzowe. Łatwo się zmywa i nie plami bielizny. Dzięki odpowiedniemu (lekko kwaśnemu) fizjologicznemu odczynowi pH oraz właściwej konsystencji nie zaburza równowagi naturalnej mikroflory miejsc intymnych.

Składniki:

Hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy, kwas borowy, dwuwodorofosforan sodu dwuwodny, fenoksyetanol, p-hydroksybenzoesan metylu (Aseptyna M), p-hydroksybenzoesan propylu (Aseptyna P), woda oczyszczona.

Stosowanie

Przed użyciem preparatu umyć ręce. Niewielką ilość żelu nanieść na miejsca wrażliwe i narażone na otarcia - przed kontaktem intymnym, badaniem ginekologicznym lub ultrasonograficznym, użyciem termometru, czopków i tamponów higienicznych. Możliwe jest również zastosowanie żelu bezpośrednio na członek partnera, osłonkę sondy ultrasonograficznej lub wziernik ginekologiczny. Preparat może być stosowany łącznie z prezerwatywą. Po użyciu należy szczelnie zamknąć tubę.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować na uszkodzone błony śluzowe i skórę. Nie należy używać z innymi produktami przeznaczonymi do stosowania dopochwowego. W przypadku ciągłego stosowania, po upływie 30 dni wymagana jest kilkudniowa przerwa.

Przechowywanie:

Preparat należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

Miejsce wytwarzania:

ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Podmiot odpowiedzialny za informacje o produkcie:

Bausch Health Poland sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 2

35 – 959 Rzeszów

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.