

OptiTherm Termofor PCV 2 litry w pokrowcu, dzianina, 1 sztuka



Cena: 20,72 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SILESIA PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu:

Stosuje się jako okład do miejscowego ogrzewania ciała, wspomagającego łagodzenie różnego rodzaju dolegliwości bólowych i rozluźnienie napiętych mięśni.

Jest wykonany z materiału PCV - bezzapachowy - alternatywa dla osób, którym przeszkadza zapach gumy.

Praktyczny pokrowiec chroni i pozwala na bezpośredni kontakt ze skórą.

Sposób użycia:

1. Termofor napełnij wodą o temperaturze ok 50°C do 2/3 objętości - napełniając termofor wodą należy trzymać go w pozycji pionowej, trzymając za otwór wlewu (można stosować lejek). Stosowanie wody o temperaturze powyżej 70°C będzie skracało żywotność wyrobu i zwiększa ryzyko uszkodzenia termoforu w czasie jego użytkowania, co może spowodować oparzenie użytkownika.

2. Po napełnieniu wodą usuń nadmiar powietrza z termoforu, przechylając go delikatnie aż do momentu gdy pojawi się woda przy otworze wlewu.

3. Następnie mocno zakręć wlew korkiem - sprawdź jego szczelność poprzez odwrócenie termoforu korkiem do dołu i obserwację przez chwilę czy nie pojawia się woda.

4. Termofor jest gotowy do użycia.

Po użyciu odkręć korek, wylej wodę i pozostaw w pozycji pionowej (otworem wlewowym do dołu) do całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie:

Termofor można myć wodą z mydłem. Nie używaj środków dezynfekujących. Pokrowiec pierz ręcznie.

Ostrzeżenia:

1. Kontroluj wyrób pod kątem zużycia i ewentualnych uszkodzeń.
2. Sprawdź szczelność przed każdym użyciem. Nie używaj wrzącej wody – gorący termofor może spowodować oparzenia.
3. Nie obciążaj nadmiernie termoforu np. poprzez siadanie na nim – grozi to pęknięciem termoforu.
4. Unikaj bezpośredniego, przedłużonego kontaktu ze skórą - używaj w pokrowcu.
5. Nie wkładaj wyrobu do kuchenki mikrofalowej.

Producent:

SILESIA PHARMA SP. Z O.O.