

Plastry Compeed na pęcherze, wąskie, 6 sztuk



Cena: 20,46 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	6 szt.
Postać	-
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu:

COMPEED® Plastry na małe i wąskie pęcherze pochłaniają nadmiar wilgoci i tworzą poduszkę ochronną, zapewniając natychmiastową ulgę w bólu i optymalne warunki gojenia się pęcherzy na stopach.

Technologia hydrokoloidowa

Technologia hydrokoloidowa Compeed® polega na zastosowaniu żelu aktywnego z cząsteczkami absorbującymi wilgoć. Gruba warstwa amortyzacji rozprządza nacisk wywierany na pęcherz, zapewniając natychmiastową ulgę w bólu. Plastry Compeed® mają wymodelowane brzegi, które gładko przylegają do skóry, nie odstając ponad jej powierzchnię. Dzięki temu tarcie jest mniejsze, a proces gojenia nie jest zaburzony przez bolesne obcieranie. Pozostaje na miejscu przez kilka dni. W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić.

NATYCHMIASTOWA ULGA W BÓLU
SZYBKIE GOJENIE
POZOSTAJE NA MIEJSCU

Właściwości plastra

Gruba warstwa amortyzacji zmniejsza nacisk i pozwala uniknąć bolesnego obcierania. Ultraprzylepne, wymodelowane krawędzie sprawiają, że plaster Compeed elastycznie dopasowuje się do ruchów i pozostaje na miejscu przez kilka dni. Dzięki swojej konstrukcji dobrze dopasowany, wodoodporny i oddychający plaster utrzymuje naturalną wilgoć i nie dopuszcza bakterii z

zewnątrz, przyspieszając naturalny proces gojenia.

JAK PRAWIDŁOWO UŻYWAĆ PRODUKTÓW COMPEED?

Oczyść i osusz skórę przed użyciem. Miejsce z pęcherzem nie może być tłuste od kremów czy olejków. Usuń warstwę papierową plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej. Przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał pęcherz. Wygładź brzegi plastra. Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni). Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij po skórze.

Producent:

JOHNSON&JOHNSON