

Posiforlid Maseczka na oczy, 1 sztuka



Cena: 43,54 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 1 szt. |
| Postać | przyrząd |
| Producent | URSAPHARM POLAND SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

Opis produktu:

Prosta i skuteczna kuracja rozgrzewająca pomocna w leczeniu zapalenia powiek i zaburzeń gruczołów Meiboma. Jedną z głównych dolegliwości w przebiegu zapalenia powiek jest zasychanie wydzieliny w gruczołach Meiboma. Ciepło oddziałujące na powieki upłynnia zaschniętą wydzielinę i pobudza krążenie krwi na krawędziach powiek. Terapia ciepłem ma zatem zasadnicze znaczenie dla przywrócenia prawidłowej funkcji gruczołów Meiboma.

Warunkiem skutecznej kuracji rozgrzewającej aplikowanej na powieki jest jednak utrzymanie wilgotnego środowiska i stałej temperatury około 45 stopni przez 5 do 7 minut. Maski można użyć około 90 razy.

Ciepło wydzielane przez maskę

zmiękcza suche łuski na brzegach powiek, stymuluje dopływ krwi do powiek oraz upłynnia wydzielinę w gruczołach Meiboma.

Podczas masażu oczu można łatwo usunąć nadmiar upłynnionej wydzieliny z gruczołów łojowych. Maski na oczy POSIFORLID® doskonale sprawdza się w leczeniu następujących chorób:

- zapalenia powiek,
- dysfunkcji gruczołów Meiboma oraz
- jęczmienia i gradówki.

Zalety:

utrzymuje stałą temperaturę na poziomie około 45 stopni przez ponad 5 minut
maska rozgrzewa się samoczynnie, nie wymaga uciążliwego nagrzewania ani gotowania przed użyciem.
brak ryzyka poparzeń.

Maskę rozgrzewającą na oczy należy stosować dwa razy dziennie. Regularne stosowanie maski na oczy POSIFORLID® przynosi szybką i trwałą ulgę oraz ma działanie relaksujące.

Producent:

Ursapharm