


Protefix, proszek mocujący do protez zębowych, ekstra-mocny, smak neutralny, 50 g

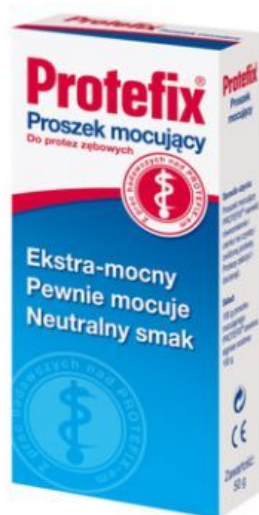

Cena: 10,94 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 g
Postać	-
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu:

Sprawdzony środek mocujący idealnie sprawdza się w przypadku niewielkich problemów z przyczepnością lub rozrzedzoną śliną. Proszek mocujący Protefix® jest wysypywany na wilgotną protezę i natychmiast po jej wsunięciu wykazuje niezawodną i długotrwałą przyczepność.

Bezwonny i bezzapachowy proszek mocujący Protefix® wykonany z naturalnego alginianu sodu jest szczególnie odpowiedni dla wrażliwych błon śluzowych jamy ustnej.

Składniki:

alginian sodu

Stosowanie:

Rozsypać proszek mocujący Protefix® równomierną, cienką warstwą na wilgotną protezę. Natychmiast po wsunięciu proteza jest mocowana na swoim miejscu i trzyma stabilnie przez wiele godzin w jamie ustnej. W przypadku przedwczesnego rozluźnienia – np. w wyniku spożywania dużej ilości płynu – wystarczy ponownie posypać protezę cienką warstwą proszku mocującego Protefix®. Proteza znów stabilnie trzyma się w jamie ustnej.

Ewentualne pozostałości proszku można łatwo zmyć z protezy szczoteczką do zębów pod bieżącą wodą. Szczególnie uporczywe resztki środka mocującego można usunąć bawełnianym wacikiem nasączonym olejem jadalnym. Aby uniknąć zbyt wysokiego zużycia środka, nie należy ścisnąć butelki.

Trzymać butelkę pod kątem i delikatnie uderzać w nią palcem wskazującym. Taki sposób zapewnia dokładne dozowanie. W przypadku stosowania zbyt dużej ilości proszku mocującego może dojść do jego utwardzenia, co zwiększa ryzyko uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej.

Producent:

Queisser Pharma GmbH
Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg
Germany