

Urgo na Odciski z ASA 12 sztuk



Cena: 14,29 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	12 szt.
Postać	-
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu:

URGO PASTRY NA ODCISKI SKUTECZNIE USUWAJĄ ODCISKI, MODZELE I NAGNIOTKI
Przyspieszają usuwanie odcisków
Chronią przed uciskiem

JAK DZIAŁAJĄ URGO PASTRY NA ODCISKI Z KWASEM SALICYLOWYM?

URGO Pastry na Odciski z Kwasem Salicylowym skutecznie usuwają odciski: nawilżają i zmiękczej naskórek, dzięki zawartości kwasu salicylowego, usuwają złuszczoną i zrogowaciałą skórę, przyspieszają proces gojenia rany, zabezpieczają przed bolesnym uciskiem, dzięki ochronnemu pierścieniowi, zapewniają komfort w miejscu aplikacji, pozwalają uniknąć dokuczliwych otarć.

JAK STOSOWAĆ URGO CORICIDE - PASTRY NA ODCISKI Z KWASEM SALICYLOWYM?

Oczyść i osusz miejsce odcisku.
Przyklej plaster tak, by odcisk znalazł się w samym środku pierścienia.
Stosuj tak długo jak będzie to potrzebne.

Producent:

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.