

Urgo Pocket plastry, 20 sztuk



Cena: 9,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 szt. (2 x 10 szt.)
Postać	plast.
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu:

Zestaw opatrunków do codziennej ochrony powierzchniowych ran w praktycznym etui

Zawiera:

10 opatrunków Urgo Sensitive Stretch (delikatne, do skóry wrażliwej)

10 opatrunków Urgo Waterproof (wodoodporne)

Jak działa URGO Pocket 10+10? Zestaw opatrunków do codziennej ochrony w etui „idealnym do torebki”, sprawdzi się w sytuacji awaryjnej poza domem. Warto mieć go zawsze przy sobie.

URGO Sensitive Stretch:

- Hipoalergiczne
- Mikro-perforowane podłoże: pozwala skórze oddychać
- Dyskretne - dopasowane do koloru skóry
- Wygodne –nie krępują ruchów
- Nieprzywierające, nie przyklejają się do rany

URGO Waterproof:

- Wodoodporne – izolują skórę od wody (morze, kąpiel, prysznic).
- Transparentne – dyskretne, umożliwiają kontrolę wysięku z rany
- Przepuszczające powietrze - pozwalają skórze oddychać
- Nieprzywierające, nie przyklejają się do rany

Dlaczego warto wybrać URGO Pocket 10+10?

URGO Sensitive Stretch to miękkie, wygodne, oddychające opatrunki od ochrony skóry wrażliwej. URGO Waterproof to opatrunki, które sprawdzą się w kąpeli np. basen, morze, prysznic. Dzięki przezroczystemu podłożu są dyskretne i umożliwiają kontrolę wysięku z rany.

JAK STOSOWAĆ URGO POCKET 10 +10?

Oczyszczyć, zdezynfekować, przemyć i starannie osuszyć ranę oraz jej okolice.

Ostrożnie nałożyć opatrunek, starannie wygładzając krawędzie.

Zmieniać opatrunek co najmniej 2 razy dziennie i po każdej kąpeli

Producent:

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.